



Désinfectant à base d'oxygène actif pour le nettoyage et la désinfection manuels des instruments.

gigasept® pearls

Notre plus

- gigasept® pearls, efficace par nature
- Large spectre d'efficacité microbiologique
- Performances de nettoyage exceptionnelles grâce à sa formule multi-enzymatiques
- pH neutre prévient la coagulation des protéines sur les surfaces
- Tensioactifs puissants
- Excellente matériocompatibilité, même sur les surfaces sensibles
- Sécurité utilisateur grâce à sa structure innovante en perles - sans poussière (aucun risque d'inhalation)
- Odeur agréable

Domaines d'utilisation

Nettoyage et désinfection des instruments médicaux thermosensibles de tous types. Convient aux matériaux sensibles tels que le silicone, le polycarbonate, le polysulfone et le verre acrylique.

gigasept® pearls peut être utilisé en bac à ultrasons.

Conseils d'utilisation

Les granules sont dilués avec de l'eau froide à la concentration souhaitée.

Dosage : 1,0% à 2,0%, en fonction de l'activité microbiologique souhaitée.

Préparez la solution avec la cuillère doseuse fournie.

Exemple d'utilisation : 3 litres de solution dilués à 2% équivalent à 2,9 litres d'eau mélangés à 1 cuillère et demi de gigasept® pearls.

Des informations supplémentaires sur le dosage du gigasept® pearls sont disponibles sur notre site internet. Ajouter de l'eau et incorporer la quantité appropriée de granulés.

Remuer plusieurs fois pendant les 15 premières minutes.

Après ce temps d'activation, la solution de travail est prête

à être utilisée. Les résidus mineurs non dissous forment un dépôt, mais n'affectent pas l'efficacité de la solution. Placer les instruments à traiter dans la solution gigasept® pearls.

S'assurer que tous les instruments et notamment les instruments creux soient bien en contact avec la préparation pour assurer une couverture complète des surfaces. Bien rincer les instruments après le nettoyage pour éliminer complètement les résidus de la solution de nettoyage. Veuillez suivre les recommandations de traitement des fabricants.

Ne pas mélanger avec d'autres produits de nettoyage ou désinfectants.

Changer la solution tous les jours. En cas de salissures plus importantes, il est conseillé de remplacer la solution plus rapidement.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	10 min
Bactéries EN13704 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	5 min
Bactéries EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	5 min
Bacille de la Tuberculose EN14348, EN14563, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	5 min
Levure EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	5 min
Fongique EN13624 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	30 min

schülke -+



Désinfectant à base d'oxygène actif pour le nettoyage et la désinfection manuels des instruments.

gigasept[®] pearls

Efficacité	Solution	Temps d'action
Virus <i>EN14476, conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI</i> - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	10 min
Clostridium difficile <i>EN13704</i> - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	30 min
Bacillus subtilis <i>EN13704</i> - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	30 min
Bacillus subtilis <i>EN13704</i> - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min

CE 0297



Données relatives au produit

Composition :

100 g de granulés contiennent les ingrédients actifs suivants : 43,0 g de percarbonate de sodium, 22,0 g de tétraacétyléthylènediamine.

Étiquetage selon le règlement (CE) no 648/2004 :

agents de blanchiment contenant >30% d'oxygène, <5% de tensioactifs non ioniques, <5% de phosphates, <5% d'EDTA, enzymes et parfums.

Données physico-chimiques

Couleur	bleu clair
pH	env. 8 / 20 g/l / 20 °C / mélangé à l'eau
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	granuleux
Viscosité dynamique	Non applicable

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante : schuelkefrance.info@schuelke.com
Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.
Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr

gigasept® pearls est un dispositif médical de classe IIb.
Marquage CE (organisme certificateur : DQS 0297).
gigasept® pearls est fabriqué par Schülke & Mayr GmbH
(Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)
Utiliser les DM avec précaution.

Remarques particulières

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et la documentation technique relative au produit.
Ne convient pas aux instruments en cuivre et chrome ou aux instruments nickelés ayant subi des dommages mécaniques antérieurs.

Avec l'ajout d'adjuvants spécifiques, le pH de gigasept® pearls est tamponné dans une plage neutre. Cela empêche la coagulation des protéines (liaison des protéines sur les surfaces) et offre également une matériocompatibilité optimale des matériaux.

Le transfert de petites quantités de la solution d'application depuis le pré-nettoyage ne devrait pas impliquer d'interactions avec les agents de nettoyage et les agents de désinfection.

Les éventuelles variations de couleurs n'affectent pas l'efficacité du produit.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
gigasept pearls 1,5 kg EM	4/Carton	70000179

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

Schülke France
Schülke France SARL
50 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
France
Tél +33 1 42 91 42 42
Fax +33 1 42 91 42 88
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com