

MD 555 cleaner

Nettoyant spécial pour les systèmes d'aspiration
(à utiliser 2 fois par semaine)



Nettoyant spécial non moussant pour les systèmes d'aspiration et des conduites d'évacuation dans les cabinets dentaires, lorsque la qualité de l'eau pose problème et dans le cas où les tuyaux d'écoulement des eaux usées ont été installés avec une pente insuffisante.



Temps d'action

 **5 %**
30 à 120 min
au moins 2 fois
par semaine

Recommandation

Dissout les
dépôts incrustés
de **poudres**
prophylactiques et
de **produits perlés**

Fonctionnement



« Détartrant/Agent de nettoyage intensif » :

Excellente performance de nettoyage contre les dépôts, par exemple le calcaire causé par une eau très dure, les résidus de sel tenaces, etc...

Préserve votre
système d'aspiration

Compatibilité des
matériaux testée

Recommandé par
les principaux fabricants
d'unités d'aspiration

Effet de nettoyage intensif

Idéal pour l'utilisation
en combinaison
avec l'Orotol plus



Caractéristiques principales

5 %
concentration de
l'application

Efficacité
de nettoyage
intensif contre
les dépôts et
les sédiments

Garantit un
fonctionnement
parfait du système
d'aspiration sur les
plans technique et
hygiénique

